


Contact DAY 1 Multifocal

Lente morbida multifocale giornaliera (58%).

Contact DAY 1, lenti a ricambio giornaliero fresche e confortevoli per tutta la durata d'uso grazie ad un agente umettante che ne garantisce un utilizzo sempre piacevole. La disponibilità sferica torica e multifocale offre un ampio ventaglio correttivo per una proposta giornaliera completa.

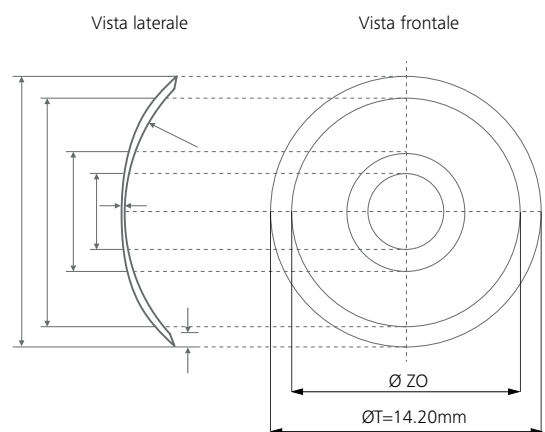

Contact DAY 1 Multifocal

Geometria	Multifocale
Materiale	Bio Hydrogel
Dk/t (-3,00)	43
H ₂ O	58%
Pack	32 pezzi
Raggio base	8,8
Diametro	14,2
Colorazione	Sì
Poteri sferici	-0,25/-10,00 int 0,25 +0,00/+5,00 int 0,25
Addizioni	A (0.75) B (1.25)

Caratteristiche

Lente a contatto che facilita il portatore nel passaggio dalla lente monofocale a quella multifocale.

Il design ottico della lente e le aree di transizione minimizzano il discomfort e migliorano le prestazioni visive.

Lente ottima per il "primo" presbite.

Codice: RA30B

Classe: 923

Contact DAY 1 Multifocal


Lente morbida multifocale giornaliera (58%).

CONSIGLI APPLICATIVI

La visione naturale è prioritaria, quindi è importante sapere che le lenti sono costruite con:


- il lontano centrale
- i profili addizionali con bassi adeguamenti di potere

DESIGN DELLE LENTI

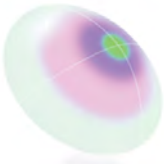

TIPO A

Questo design garantisce una visione naturale simile a quella di una monofocale

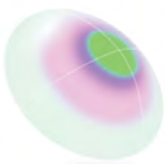

TIPO B

Questo design sottolinea e definisce le differenze tra la visione da lontano e da vicino

■ Area di visione per lontano

■ Zona di transizione










■ Area di visione per vicino

- Partire con lenti di TIPO A
- Per addizioni da 1,50 o superiori usare il TIPO B per una corretta visione sia da lontano che da vicino
- Verificare la tolleranza e la visione dopo 30 minuti circa.
- Se, dopo aver provato una lente di TIPO A, la visione per vicino risultasse non soddisfacente, provare una lente di TIPO B

Le **Contact DAY 1 Multifocal** sono state create per fornire una visione naturale.

Per arrivare a questo vengono adottate variazioni di potere tali da evitare una riduzione della visione per lontano.

Schema degli anelli di Landolt

Visione lente singola		→		
Potere d'addizione + 0,75		→		
Potere d'addizione + 1,50		→		
Potere d'addizione maggiore		→		

Codice: RA30B

Classe: 923